

BATRIK BROSSES MÉTALLIQUES ARC^{MC} À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Vous avez le choix avec nos brosses métalliques ARC^{MC}. Nos brosses à usage unique et réutilisables sont disponibles dans des variétés souples et rigides et dans une multitude de tailles. Les brosses métalliques ARC^{MC} sont garanties pour durer plus longtemps que les fils torsadés et préserver l'intégrité de vos précieux instruments.

CONSEILS POUR LE CHOIX DES BROSSES :

SPÉCIFICATIONS DES INSTRUMENTS

Quelle est la longueur maximale du ou des instruments à nettoyer?

Ajoutez au moins 5 cm (2") à cette longueur, afin d'avoir une longueur suffisante pour travailler.

Quel est le diamètre intérieur de l'instrument?

Ajoutez au maximum 3 mm (0,125") pour déterminer le diamètre du poil afin d'assurer un nettoyage efficace. Le diamètre du poil doit être légèrement supérieur au diamètre du tube intérieur. Les poils trop gros se courbent trop et ne nettoient pas efficacement.

SÉLECTION DES BROSSES

Il vous suffit de trouver dans notre catalogue la section qui correspond le mieux à la longueur et au diamètre de votre instrument. En règle générale, si votre brosse actuelle mesure 20,32 cm (8") de long et que nous ne proposons que 25,4 cm (10") de long avec le diamètre requis, cela est tout à fait acceptable.


Dans de nombreux cas, nos brosses métalliques ARC^{MC} auront plus de poils sur la brosse. Par exemple, de nombreuses brosses de 5 mm (0,19") de diamètre ne font que 2,5 cm (1") de long. Chez BATRIK, nous nous sommes efforcés de fournir la plus grande quantité de poils pour assurer le nettoyage le plus efficace possible.

BROSSES MÉTALLIQUES PERSONNALISABLES


Un aspect unique des brosses métalliques à usage unique ARC^{MC} est qu'elles peuvent être personnalisées à n'importe quelle longueur :

- Jusqu'à 2 000 mm pour les brosses métalliques sur gaines en plastique semi-rigides, brosses rigides de 5 à 20 mm de diamètre
- Aucune limite de longueur pour les brosses métalliques sur des gaines en plastique souples, brosses souples de 2 à 5 mm de diamètre.

RIGIDE

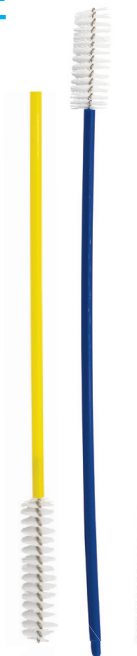

FLEXIBLE

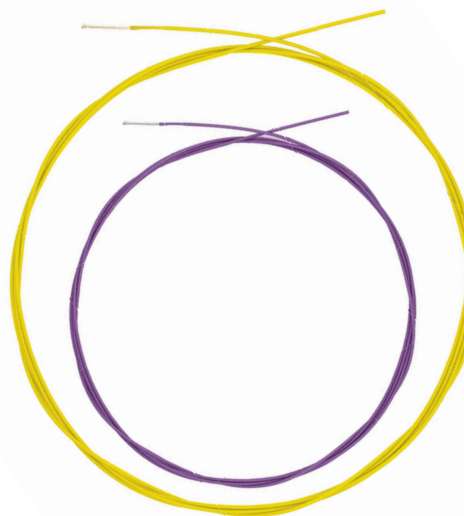

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 12" / 30 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-31502-S	41-31502	Blanc	12,401" / 31,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-32503-S	41-32503	Jaune	12,795" / 32,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-32504-S	411-32504	Lavande	12,795" / 32,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-32505-S	411-32505	Gris	12,795" / 32,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-35005-S	41-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35006-S	41-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35008-S	41-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35010-S	41-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35012-S	41-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35015-S	41-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-35020-S	41-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique: sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 18" / 45 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-46502-S	41-46502	Blanc	18,307" / 46,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-47503-S	41-47503	Jaune	18,7" / 47,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-47504-S	411-47504	Lavande	18,7" / 47,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-47505-S	411-47505	Gris	18,7" / 47,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-50005-S	41-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50006-S	41-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50008-S	41-50008	Bleu	1,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50010-S	41-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50012-S	41-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50015-S	41-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-50020-S	41-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 24" / 60 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-61502-S	41-61502	Blanc	24,212" / 61,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1mm
	41-62503-S	41-62503	Jaune	24,6" / 62,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1mm
	411-62504-S	411-62504	Lavande	24,6" / 62,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55mm
	411-62505-S	411-62505	Gris	24,6" / 62,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-65005-S	41-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	41-65006-S	41-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	41-65008-S	41-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65010-S	41-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65012-S	41-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65015-S	41-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-65020-S	41-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 30" / 75 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-76502-S	41-76502	Blanc	30,118" / 76,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-77503-S	41-77503	Jaune	30,511" / 77,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-77504-S	411-77504	Lavande	30,511" / 77,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-77505-S	411-77505	Gris	30,511" / 77,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-80005-S	41-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80006-S	41-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80008-S	41-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80010-S	41-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80012-S	41-80012	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80015-S	41-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-80020-S	41-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm



EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

FLEXIBLE 2 MM

FLEXIBLE 3 MM

FLEXIBLE 4 MM

FLEXIBLE 5 MM

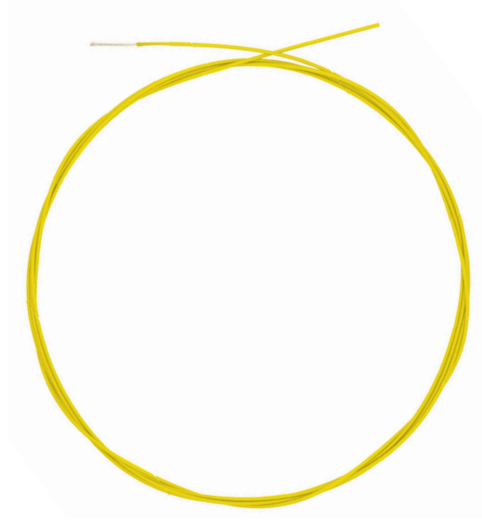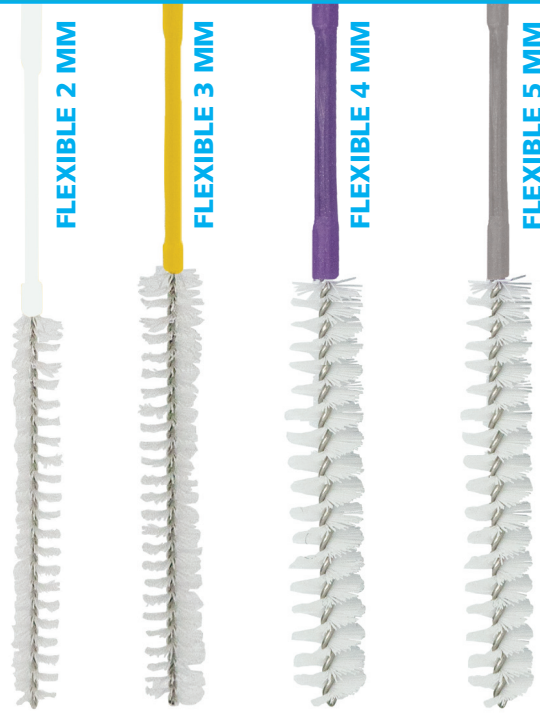

FLEXIBLE

Diamètre (Ø) de la brosse flexible allant de 2 mm à 5 mm

RIGIDE 20 MM

RIGIDE 15 MM


RIGIDE 12 MM

RIGIDE 10 MM

RIGIDE 8 MM

RIGIDE 6 MM

RIGIDE 5 MM

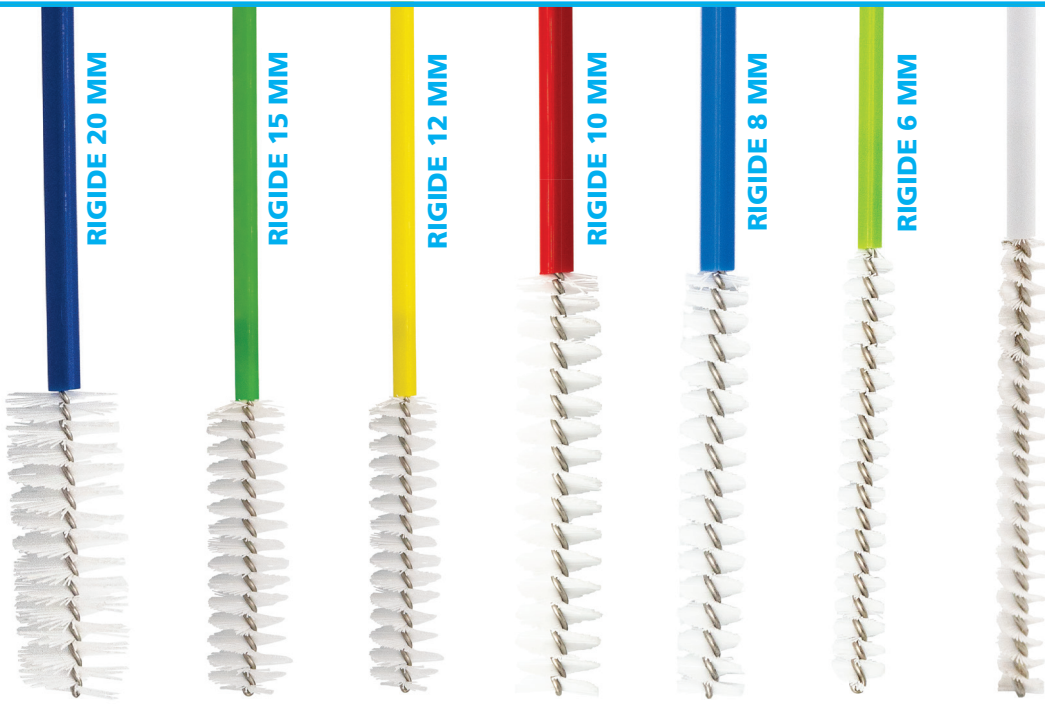

RIGIDE

Diamètre (Ø) de la brosse rigide allant de 5 mm à 20 mm

SYSTÈME DE SÉLECTION DES BROSSES (Taille Réelle)

2 mm 0,078"	3 mm 0,118"	4 mm 0,157"	5 mm 0,196"	6 mm 0,236"	8 mm 0,314"	10 mm 0,394"	12 mm 0,472"	15 mm 0,591"	20 mm 0,787"