

Your First MC

ENVIRO-SACHET MC



NETTOYAGE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
EN FORMATS ENZYMATIQUE ET NON-ENZYMATIQUE

ENVIRO-SACHET^{MC}

GEL ENZYMATIQUE ET NETTOYANT NON-ENZYMATIQUE

Voici **Your First ✓^{MC}** Enviro-Sachet^{MC}, nos solutions de nettoyage uniques, désormais disponibles en formats **Enzymatique** et **Non-Enzymatique**.

Notre format de **Gel Enzymatique** est formulé avec la même triple action **PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}** que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance.

Notre format de **Nettoyant Non-Enzymatique** est formulé avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre.

Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un pré-nettoyage efficace des surfaces et des instruments.



LE KIT D'ÉCHANTILLONS **Your First ✓^{MC}**

- 3** Ensembles d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet
- 1** Ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet
- 1** Bol réutilisable en acier inoxydable

Remarque : Nos kits d'échantillons sont disponibles en formats gel enzymatique et nettoyant non-enzymatique.

AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

- ✓ Les petits sachets et les éponges plates permettent de réduire considérablement les emballages inutiles.
- ✓ Les formules concentrées sont mélangées avec de l'eau sur place, ce qui réduit la taille du sachet et donc la fréquence et les frais d'expédition, ainsi que les émissions qui en découlent.
- ✓ Le bol réutilisable en acier inoxydable élimine le besoin permanent de plateaux de pulpe moulée à usage unique qui ne sont pas aussi recyclables à 100% qu'on le prétend.

COMPAREZ ET ÉCONOMISEZ

UNE BOÎTE ENVIRO-SACHET^{MC} EST
ÉQUIVALENTE À DIX BOÎTES DE PRODUITS
CONCURRENTS COMPARABLES

PROFITEZ **D'IMPORTANTES**
ÉCONOMIES DE TRANSPORT
GRÂCE À **YOUR FIRST ✓^{MC}**

C'EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3

1
**AJOUTEZ DE L'EAU
DANS LE BOL**


Ajoutez 100-500 ml d'eau pour obtenir la quantité de liquide selon votre meilleure pratique. Mesure précise non requise.

2
**VIDEZ LE SACHET
DANS LE BOL**


Ne vous inquiétez pas de faire sortir tout le produit, nous vous en avons fourni un peu plus.

3
**PRESSEZ L'ÉPONGE 3 À
4 FOIS**


Vous ne verrez peut-être pas beaucoup de bulles. C'est normal.

✓ Utilisez l'éponge humidifiée pour essuyer la partie insérée de l'endoscope ou le chevet, selon votre meilleure pratique.

✓ Si vous le souhaitez, vous pouvez aspirer/irriguer l'endoscope avec la solution restante. Respectez toujours vos meilleures pratiques.

✓ Nettoyez / stérilisez le bol réutilisable en acier inoxydable pour qu'il soit prêt pour la prochaine utilisation.*

SELECTION DES PRODUITS

GEL ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON-ENZYMATIQUE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
17-166	717-166	1 Ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	25 / Boîte 4 Boîtes / Boîtier
17-266	717-266	1 Ensemble d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC}	50 / Boîte 4 Boîtes / Boîtier
17-177	717-177	1 Kit éponge tubulaire sèche, Enviro-Sachet ^{MC} et bol réutilisable en acier inoxydable	1 Kit
17-277	717-277	1 Kit éponge plate sèche, Enviro-Sachet et bol réutilisable en acier inoxydable	1 Kit
17-EZSAMP	717-EZSAMP	LE KIT D'ÉCHANTILLONS COMPREND: 3 Ensembles d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 Ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet ^{MC} 1 Bol réutilisable en acier inoxydable	1 Kit
H-EZ500		Bol réutilisable en acier inoxydable 4.3" x 5.3" x 3" / 11 cm x 13.5 cm x 7.5 cm	1 Unité

*Selon vos procédures internes de nettoyage et de stérilisation.

Your First MC

ENVIRO-SACHET MC

GEL ENZYMATIQUE ET
NETTOYANT NON-ENZYMATIQUE



**EFFICACE
ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE**



SURGMED GROUP

850 Halpern Ave., (Dorval) Montreal QC H9P 1G6
T: +1 514-631-7988 | T. F.: 800-661-5432 | F.: +1 514-631-9083
Courriel: info@surgmed.com | Site web: www.batrik.com