


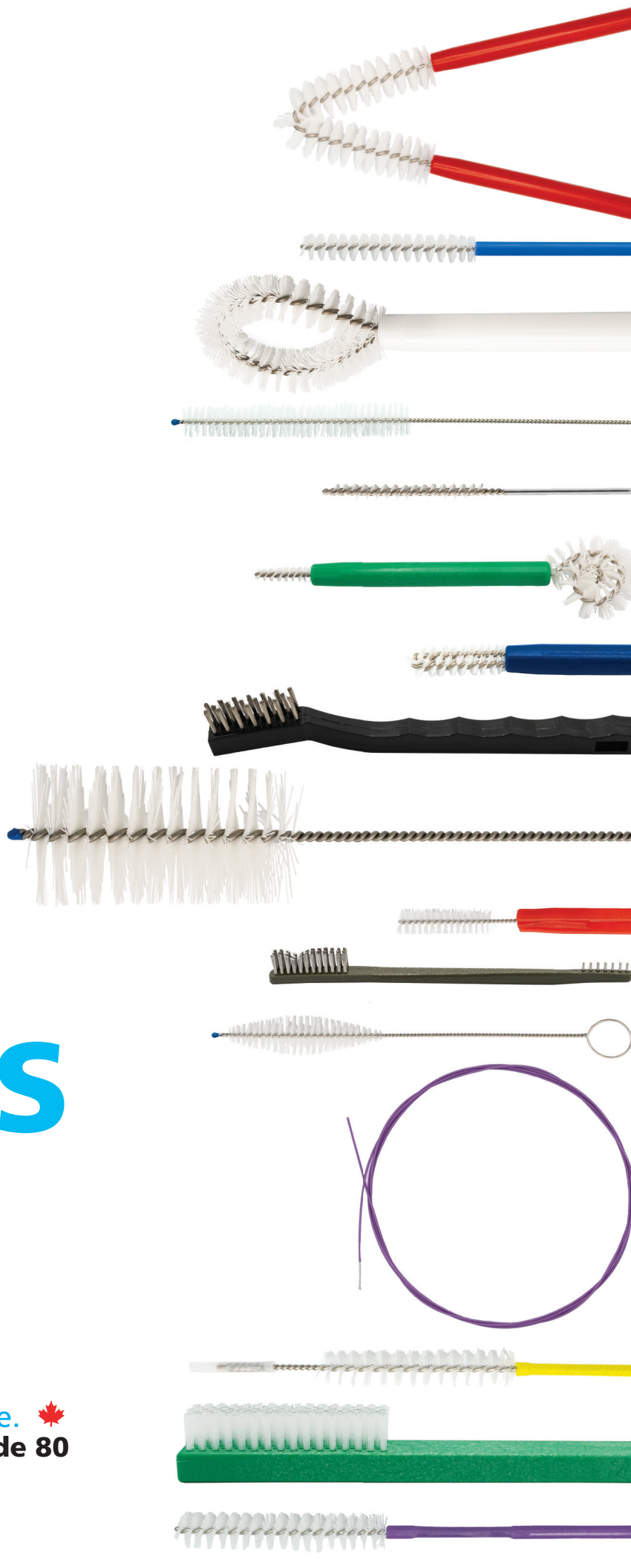

GAMME DE BROSSES

Créée en 1997. Fièrement canadienne. 
Produits commercialisés dans plus de 80
pays dans le monde.



BATRIK

BROSSES MÉTALLIQUES ARC^{MC} À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Vous avez le choix avec nos brosses métalliques ARC^{MC}. Nos brosses à usage unique et réutilisables sont disponibles dans des variétés souples et rigides et dans une multitude de tailles. Les brosses métalliques ARC^{MC} sont garanties pour durer plus longtemps que les fils torsadés et préserver l'intégrité de vos précieux instruments.

CONSEILS POUR LE CHOIX DES BROSSES :

SPÉCIFICATIONS DES INSTRUMENTS

Quelle est la longueur maximale du ou des instruments à nettoyer?

Ajoutez au moins 5 cm (2") à cette longueur, afin d'avoir une longueur suffisante pour travailler.

Quel est le diamètre intérieur de l'instrument?

Ajoutez au maximum 3 mm (0,125") pour déterminer le diamètre du poil afin d'assurer un nettoyage efficace. Le diamètre du poil doit être légèrement supérieur au diamètre du tube intérieur. Les poils trop gros se courbent trop et ne nettoient pas efficacement.

SÉLECTION DES BROSSES

Il vous suffit de trouver dans notre catalogue la section qui correspond le mieux à la longueur et au diamètre de votre instrument. En règle générale, si votre brosse actuelle mesure 20,32 cm (8") de long et que nous ne proposons que 25,4 cm (10") de long avec le diamètre requis, cela est tout à fait acceptable.


Dans de nombreux cas, nos brosses métalliques ARC^{MC} auront plus de poils sur la brosse. Par exemple, de nombreuses brosses de 5 mm (0,19") de diamètre ne font que 2,5 cm (1") de long. Chez BATRIK, nous nous sommes efforcés de fournir la plus grande quantité de poils pour assurer le nettoyage le plus efficace possible.

BROSSES MÉTALLIQUES PERSONNALISABLES


Un aspect unique des brosses métalliques à usage unique ARC^{MC} est qu'elles peuvent être personnalisées à n'importe quelle longueur :

- Jusqu'à 2 000 mm pour les brosses métalliques sur gaines en plastique semi-rigides, brosses rigides de 5 à 20 mm de diamètre
- Aucune limite de longueur pour les brosses métalliques sur des gaines en plastique souples, brosses souples de 2 à 5 mm de diamètre.

RIGIDE

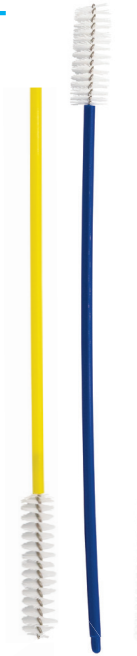

FLEXIBLE

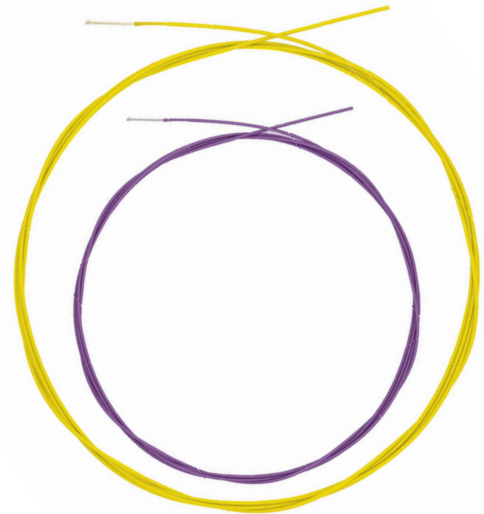

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 12" / 30 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-31502-S	41-31502	Blanc	12,401" / 31,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-32503-S	41-32503	Jaune	12,795" / 32,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-32504-S	411-32504	Lavande	12,795" / 32,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-32505-S	411-32505	Gris	12,795" / 32,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-35005-S	41-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35006-S	41-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-35008-S	41-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35010-S	41-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35012-S	41-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-35015-S	41-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-35020-S	41-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique: sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 18" / 45 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINE	41-46502-S	41-46502	Blanc	18,307" / 46,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-47503-S	41-47503	Jaune	18,7" / 47,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-47504-S	411-47504	Lavande	18,7" / 47,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-47505-S	411-47505	Gris	18,7" / 47,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINE	41-50005-S	41-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50006-S	41-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-50008-S	41-50008	Bleu	1,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50010-S	41-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50012-S	41-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-50015-S	41-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-50020-S	41-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 24" / 60 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-61502-S	41-61502	Blanc	24,212" / 61,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1mm
	41-62503-S	41-62503	Jaune	24,6" / 62,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1mm
	411-62504-S	411-62504	Lavande	24,6" / 62,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55mm
	411-62505-S	411-62505	Gris	24,6" / 62,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-65005-S	41-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	41-65006-S	41-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	41-65008-S	41-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65010-S	41-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65012-S	41-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-65015-S	41-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-65020-S	41-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 30" / 75 CM

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
FLEXIBLE BROSSE ET GAINÉ	41-76502-S	41-76502	Blanc	30,118" / 76,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	41-77503-S	41-77503	Jaune	30,511" / 77,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	411-77504-S	411-77504	Lavande	30,511" / 77,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	411-77505-S	411-77505	Gris	30,511" / 77,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
RIGIDE BROSSE ET GAINÉ	41-80005-S	41-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80006-S	41-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	41-80008-S	41-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80010-S	41-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80012-S	41-80012	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	41-80015-S	41-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	41-80020-S	41-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm



EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

FLEXIBLE 2 MM

FLEXIBLE 3 MM

FLEXIBLE 4 MM

FLEXIBLE 5 MM

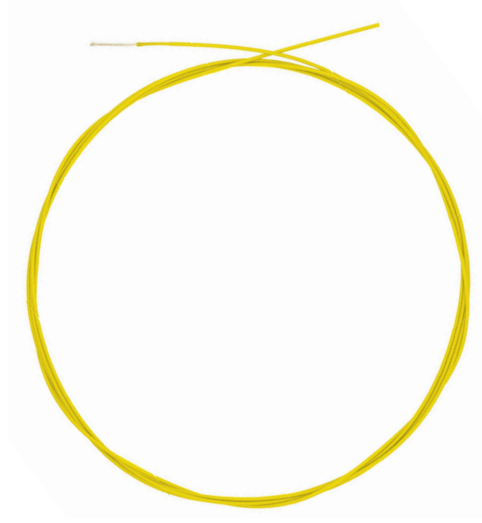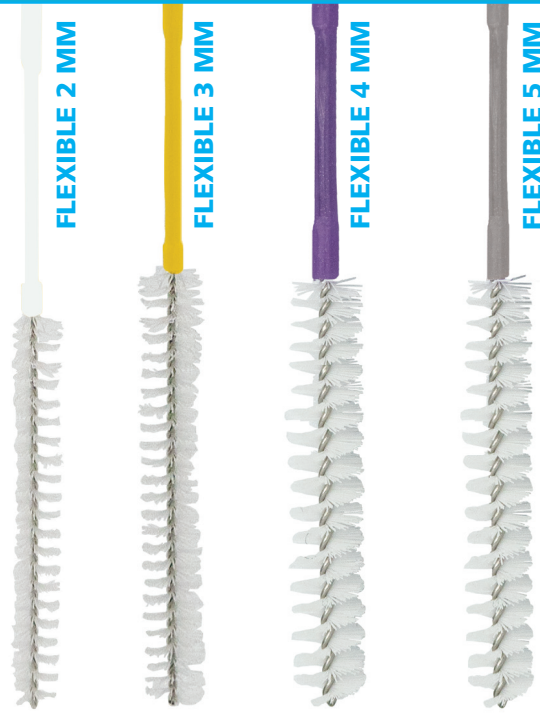

FLEXIBLE

Diamètre (Ø) de la brosse flexible allant de 2 mm à 5 mm

RIGIDE 20 MM

RIGIDE 15 MM


RIGIDE 12 MM

RIGIDE 10 MM

RIGIDE 8 MM

RIGIDE 6 MM

RIGIDE 5 MM

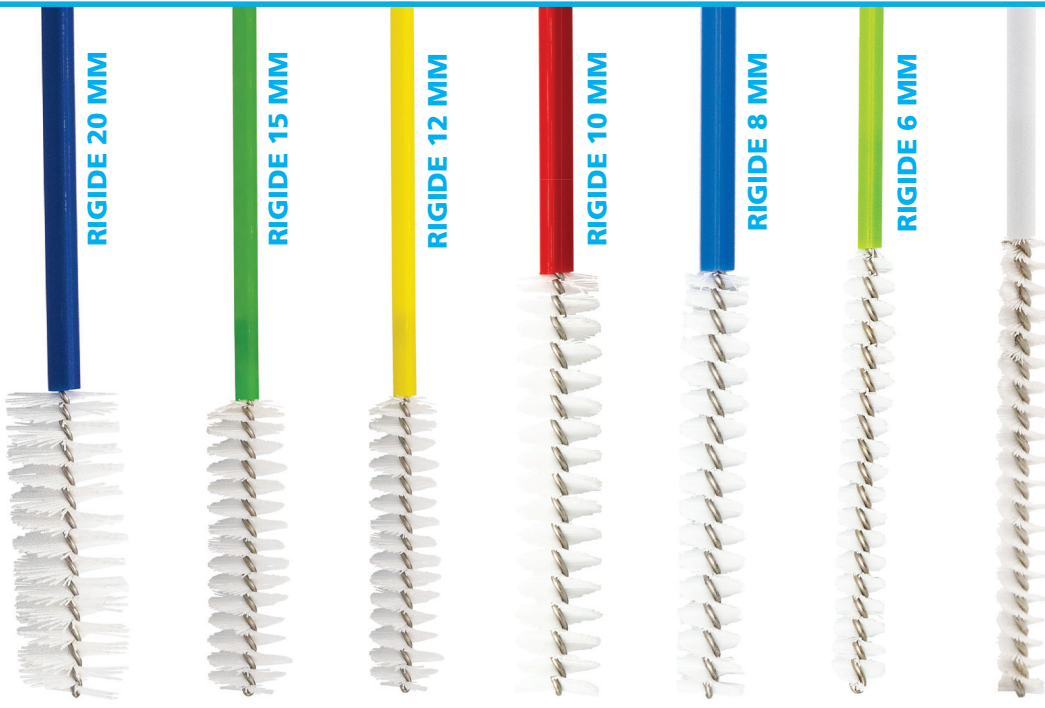

RIGIDE

Diamètre (Ø) de la brosse rigide allant de 5 mm à 20 mm

SYSTÈME DE SÉLECTION DES BROSSES (Taille Réelle)

2 mm 0,078"	3 mm 0,118"	4 mm 0,157"	5 mm 0,196"	6 mm 0,236"	8 mm 0,314"	10 mm 0,394"	12 mm 0,472"	15 mm 0,591"	20 mm 0,787"

BATRIK

BROSSES MÉTALLIQUES

DOUBLES RÉUTILISABLES ARC^{MC}

ASYMÉTRIQUES

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-35056	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35810	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35112	Jaune	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35152	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-50056	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50810	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50112	Jaune	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50152	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-65056	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65810	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65152	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-80056	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80810	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80152	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

BROSSES MÉTALLIQUES

DOUBLE RÉUTILISABLE ARC^{MC}

SYMÉTRIQUES

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50008	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BROSSES ASYMÉTRIQUES

5 MM

6 MM



8 MM

10 MM



10 MM

12,5 MM



15 MM

20 MM




BATRIK BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES ANTIMICROBIENNES RÉUTILISABLES IN-BRUSH^{MC}

Nos brosses métalliques torsadées antimicrobiennes réutilisables In-Brush^{MC} sont conçues pour être utilisées avec les tubes d'aspiration Frazier/Baron. Les fils torsadés ont un diamètre fin/moyen tout en étant suffisamment rigides pour assurer une excellente capacité de nettoyage.

Notre large assortiment de brosses métalliques torsadées en nylon est idéal pour les instruments endoscopiques et les instruments de grand diamètre et de forme unique.

BON À SAVOIR : NOS BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES SONT DOTÉES D'UNE POINTE BLEUE DE PROTECTION POUR PLUS DE SÉCURITÉ.

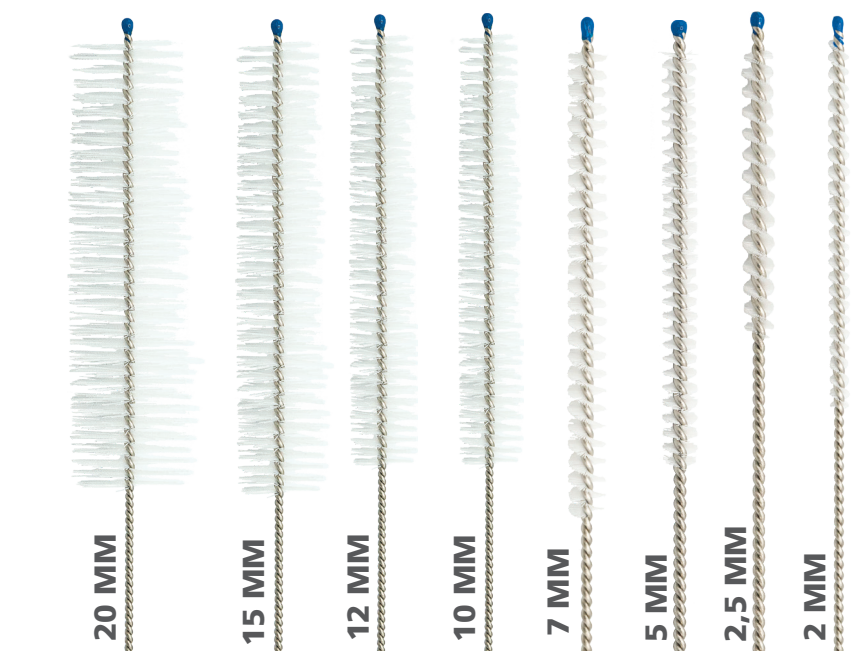

BROSSES À TUBE D'ASPIRATION DE 10" / 250 MM FRAZIER / BARON

N° D'ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
21-10039	3 FR	0,5" / 12,7 mm	0,039" / 1 mm
21-10067	5 FR	0,5" / 12,7 mm	0,065" / 1,67 mm
20-10059	5 FR	1" / 25,4 mm	0,059" / 1,50 mm
20-10079	6 FR	1" / 25,4 mm	0,079" / 2 mm
20-10090	7 FR	1" / 25,4 mm	0,090" / 2,3 mm
20-10106	8 FR	1" / 25,4 mm	0,106" / 2,7 mm
20-10118	9 FR	1" / 25,4 mm	0,118" / 3 mm
20-10129	10 FR	1,5" / 38 mm	0,129" / 3,3 mm
20-10146	11 FR	1,5" / 38 mm	0,146" / 3,7 mm
20-10157	12 FR	1,5" / 38 mm	0,157" / 4 mm

EMBALLAGE : sac de 3
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 12" / 305 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
22-12078	2" / 50,8 mm	0,078" / 2 mm
22-12118	2" / 50,8 mm	0,118" / 3 mm
22-12157	3" / 76 mm	0,157" / 4 mm
22-12197	3" / 76 mm	0,197" / 5 mm
22-12236	3" / 76 mm	0,236" / 6 mm
22-12393	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm

EMBALLAGE : sac de 3
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 16" / 406 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
23-16197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
23-16236	2,5" / 63,5 mm	0,236" / 6 mm
23-16276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
23-16394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
23-16472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm
23-16591	3" / 76 mm	0,591" / 15 mm
23-16787	3" / 76 mm	0,787" / 20 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 18" / 457 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
19-18010	0,47" / 12 mm	0,039" / 1 mm
19-18015	0,5" / 12 mm	0,06" / 1,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 24" / 610 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
24-24098	2,5" / 63,5 mm	0,098" / 2,5 mm
24-24197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
24-24276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
24-24394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
24-24472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm


EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BROSSES DE TRACHÉOSTOMIE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
25-08500	Grande 6-12,3 3 / 4"	8" / 203 mm	3,75" / 95 mm	0,5" / 12,7 mm
25-37550	Petite 000-5,1 7 / 8"	4" / 93 mm	1,88" / 48 mm	0,5" / 12,7 mm

EMBALLAGE : sac de 3. Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

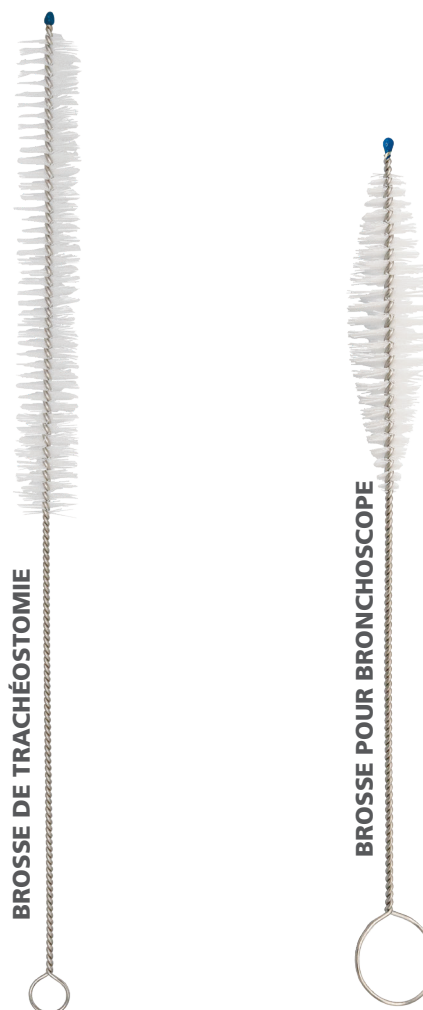
BROSSES POUR BRONCHOSCOPE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø) POUCES / MM
26-06175	Petite	6" / 152 mm	1,75" / 44,5 mm
26-08325	Grande	8" / 203 mm	3,25" / 82,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK MICRO-BROSSES EN ACIER INOXYDABLE ARC^{MC}

Nos micro-brosses en acier inoxydable ARC^{MC} sont parmi les plus petites brosses de l'industrie. Elles sont conçues pour nettoyer des canaux d'un diamètre intérieur allant de 0,5 mm à 1,40 mm.

- La gaine flexible en acier inoxydable ne se plie pas comme les brosses métalliques torsadées ordinaires
- Les poils en polyamide empêchent ou ralentissent la croissance bactérienne entre les stérilisations
- Réutilisables*
- Disponibles en deux longueurs

CONSEIL : IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TECHNIQUE DE TRACTION AVEC CES BROSSES. IL SUFFIT D'INSÉRER D'ABORD L'EXTRÉMITÉ ÉMOUSSÉE, SANS BROSSE.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	TAILLE DE LA BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)	EMBALLAGE
35-03015	12" / 30 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube
35-04515	18" / 45 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube

*Même si tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ces brosses peuvent être réutilisés à plusieurs reprises, en raison de la nature délicate de ces brosses, la réutilisation est conditionnée par leur manipulation et leur application.

BATRIK BROSSES PLATES POUR NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Nos brosses plates pour le nettoyage des instruments sont spécialement conçues pour une utilisation en milieu hospitalier pour le prénettoyage et la préparation des instruments.

- Le long manche ergonomique permet une utilisation facile
- Longueur supplémentaire de la tête de brosse (60 [±5] mm en usage unique et 75 [±5] mm en usage réutilisable)
- Les fibres transparentes de la brosse permettent de vérifier rapidement sa propreté
- La poignée en plastique ne libère aucun composant toxique
- Disponibles en 6 modèles (4 réutilisables/autoclavables et 2 à usage unique)



FLEXIBLE

Cette brosse est conçue pour les instruments de grande taille qui nécessitent un nettoyage plus délicat, comme les optiques, les plastiques ou les endroits difficiles d'accès.



EXTRA-FLEXIBLE

Les poils très longs et flexibles éliminent tout stress lors de l'assainissement, et en font la brosse idéale pour les instruments fragiles ainsi que pour les endoscopes souples et rigides. La longueur des poils permet de nettoyer des zones qui seraient autrement difficiles à atteindre, comme le canal des accessoires ou la déviation de l'extrémité des endoscopes souples.



RIGIDE

La rigidité de cette brosse, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliorent et simplifient le nettoyage des instruments.



EXTRA-RIGIDE

Les fibres de polyamide sans danger pour les instruments offrent une rigidité semblable à celle de l'acier et permettent un nettoyage en profondeur des instruments souillés, en particulier sur les surfaces rainurées ou inégales.



50-40919



50-40921



50-40920



50-40918



50-40922



50-40917

SÉLECTION DE PRODUITS

N°D'ARTICLE	TYPE DE BROSSSE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSSE	TAILLE DE LA BROSSSE	EMBALLAGE
50-40917	Extra rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Bleu	220 mm	75 mm x 20 mm x 10 mm	Sac de 3
50-40918	Rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Vert	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40919	Flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Jaune	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40920	Extra flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Rouge	220 mm	75 mm x 20 mm x 25 mm	Sac de 3
50-40921	Flexible	Brosse plate à usage unique	Orange	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20
50-40922	Rigide	Brosse plate à usage unique	Bleu ciel	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20


Les modèles réutilisables sont également disponibles en sacs de 50. Ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

BROSSE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES

Notre brosse de nettoyage réutilisable pour râpes orthopédiques est utilisée pour nettoyer les râpes orthopédiques et autres instruments similaires utilisés en chirurgie orthopédique.

- Elle est durable et peut supporter de nombreux cycles de stérilisation
- Poignée ergonomique en thermoplastique vaporisable
- Soies antibactériennes en polyamide
- Réutilisable
- Sans latex

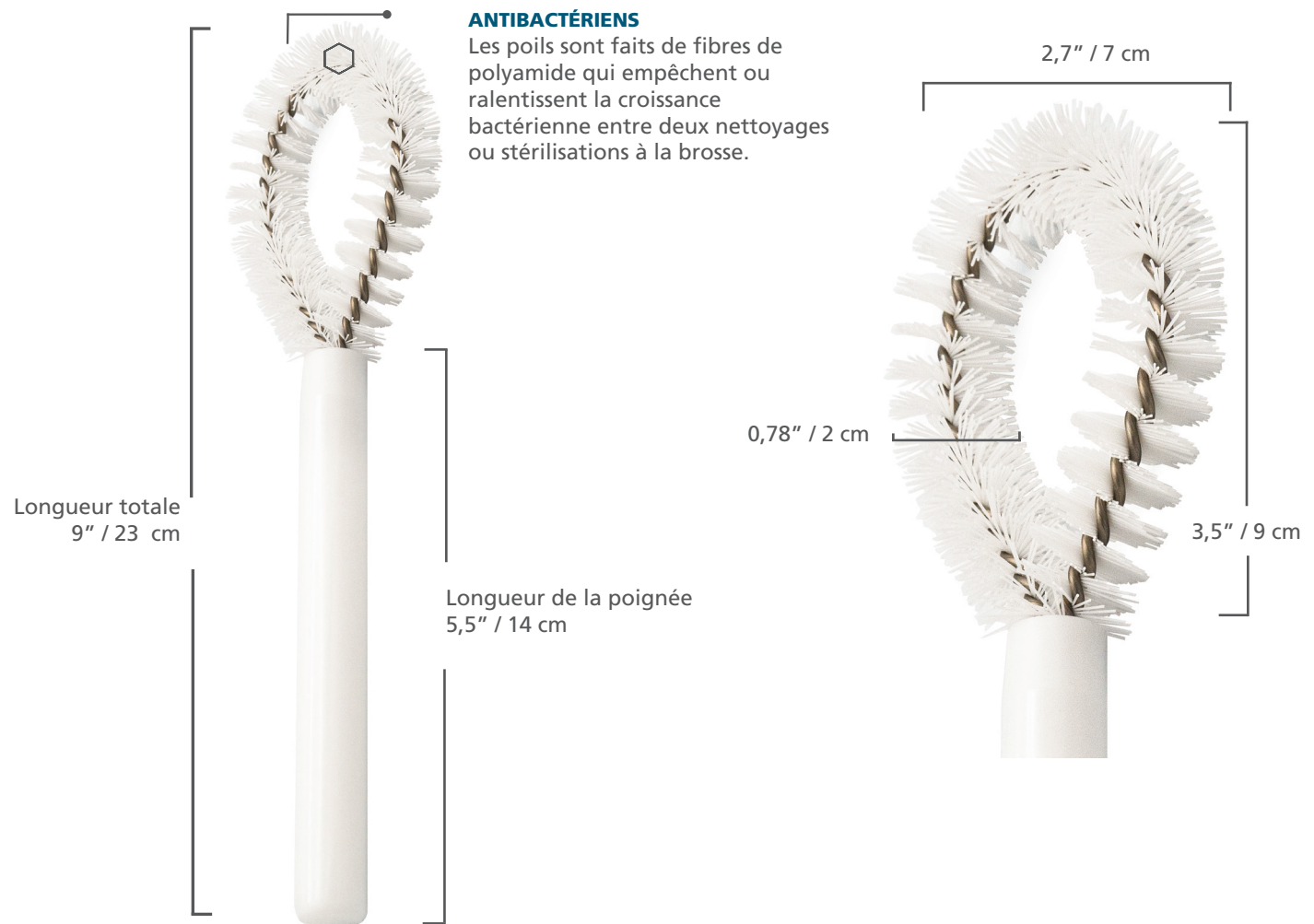

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU MANCHE	TAILLE DE LA BROSSSE	EMBALLAGE
50-RASP	9" / 23 cm	5,5" / 14 cm	0,78" x 2,7" x 3,5" 2 cm x 7 cm x 9 cm	3 / sac


BATRIK

BROSSE DE PRÉCISION RÉUTILISABLE

NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Notre brosse de précision réutilisable pour le nettoyage des instruments est la brosse idéale pour l'élimination rapide des débris difficiles. Elle nettoie aussi bien en externe qu'en profondeur dans les mâchoires des instruments. Bien que les poils fermes et durables donnent l'impression d'être en acier inoxydable, il n'y a absolument aucun risque de dommages aux instruments ou de blessures corporelles.

- Les poils ont une densité extra-ferme et une durabilité supérieure
- Poils en polyamide (TYNEX^{MD})
- Poignée ergonomique en thermoplastique étuvable
- Stérilisable à la vapeur/chimique
- Sans latex

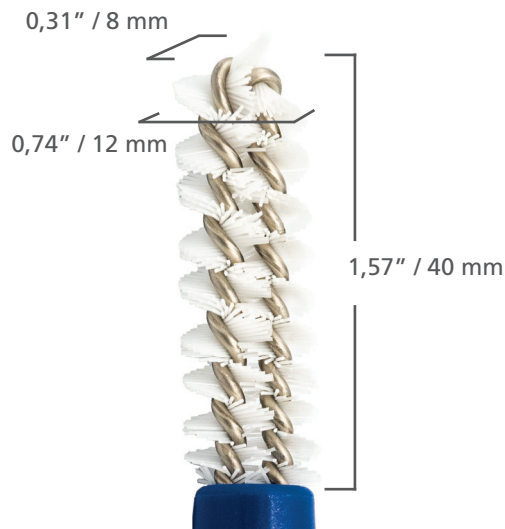

BON À SAVOIR : ÉLIMINE LE
BESOIN DE LA BROSSSE À DENTS
EN ACIER INOXYDABLE, QUI PEUT
ENDOMMAGER LES
INSTRUMENTS DE VALEUR !

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE
50-40800	Brosse de précision réutilisable pour nettoyage externe	6,29" / 160 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

BROSSES RÉUTILISABLES POUR LE NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Conçues spécifiquement pour les applications hospitalières, nos brosses réutilisables pour le nettoyage des instruments sont dotées de poils longs et flexibles pour maximiser l'efficacité du nettoyage des grandes surfaces.


- Poils transparents en polyamide de haute qualité
- Débris faciles à identifier
- Autoclavable
- Sans latex

BROSSE RÉUTILISABLE À BOCAL / BOUTEILLE



Poignée ergonomique

BROSSE POUR DRAIN DE STÉRILISATEUR

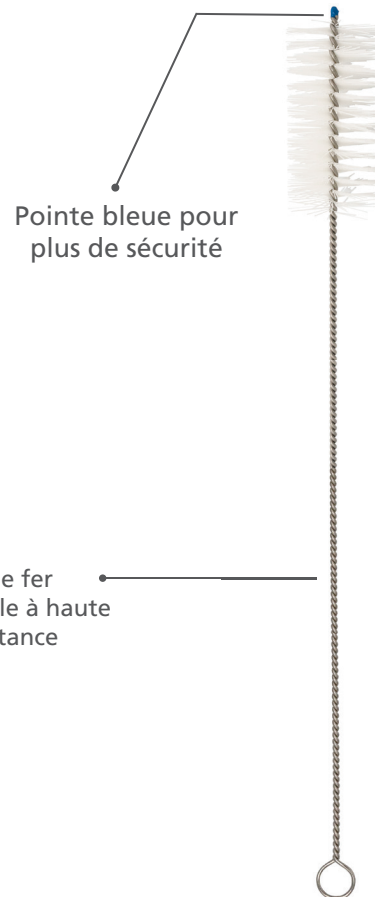

Pointe bleue pour plus de sécurité

Fil de fer inoxydable à haute résistance

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA POIGNÉE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR TOTALE
50-10295	Brosse réutilisable à bocal / bouteille	120 mm ± 2 mm	120 mm ± 5 mm	7 mm ± 2 mm	13,19" / 355 mm
50-10224	Brosse de nettoyage pour drain du stérilisateur	S. o.	4" / 10,1 cm	2" / 5,08 cm	24" / 609 mm

EMBALLAGE : sac de 3

BATRIK

BROSSE D'ALÉSOIR ACÉTABULAIRE

Notre brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour le nettoyage des alésours d'os acétabulaire. La brosse à tête circulaire de style « queue de cochon » est conçue pour nettoyer efficacement l'intérieur de l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'autre extrémité sert à nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de la brosse avec la poignée, ainsi que ses poils de qualité médicale antimicrobiens, assurent un outil de nettoyage durable, réutilisable et très efficace.



4,72" / 120 cm

BROSSE DROITE



1,18" / 30 mm longueur

BROSSE RONDE



2" / 50 mm longueur

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DU POIGNÉ	BROSSE DROITE	BROSSE RONDE
50-ACETAB	Brosse de nettoyage d'alésoir acétabulaire	4,72" / 120 mm Ø 0,47" / 12 mm	1,18" / 30 mm Ø 0,3125" / 8 mm	2" / 50 mm Ø 1,75" / 45 mm

EMBALLAGE : sac de 3

REMARQUE : Spécifications sujettes à de petites variations

BATRIK BROSSES RÉUTILISABLES TOUT USAGE

Brosses à poignée en plastique

Nous proposons un large choix de brosses pour le nettoyage des instruments. Ces brosses sont idéales pour les instruments de grand diamètre, de forme unique et endoscopiques.

Poignée en plastique In-Brush^{MC}

Disponible en brosse à dents ordinaire (poils en nylon ou en acier inoxydable) et en brosse à double extrémité.



28-72550



28-69394



29-72550



29-69394



29-70050



50-40911

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSSE	HAUTEUR DE LA BROSSSE
28-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-70050	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en laiton à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
28-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
29-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
50-40911	Brosse en nylon pour le lavage des mains Réutilisable et autoclavable	4,9" / 104 mm	3,74" / 95 mm	1,1" / 28 mm

EMBALLAGE : sac de 3 - Pour un sac de 50, ajoutez « -50 » après le code de l'article.

BATRIK

ENSEMBLES DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE


BROSSE RONDE

- Comprend 3 trous pour le placement réglable des pôles.
- Le placement réglable de la brosse (parallèle ou perpendiculaire) et la longueur plus importante de la brosse permettent d'accéder facilement aux coins difficiles à atteindre
- Fabriquée avec des poils de polyester approuvés par la FDA

BROSSE À MAIN

- Poignée ergonomique pour un meilleur confort de la main
- Des poils de polyester plus longs, approuvés par la FDA
- Facile à nettoyer (pas de cavité)

SÉLECTION DE PRODUITS

ENSEMBLE RÉGULIER DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVEREG	Ensemble RÉGULIER de brosse de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 8,89 cm x 20,32 cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm

ENSEMBLE SUPÉRIEUR DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
50-CLAVESUP	Ensemble SUPÉRIEUR de brosse de nettoyage pour autoclave	50-35900	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 11,5 cm x 20,32cm
		50-55800	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		50-EXTPOLE	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm
		SF-100	2 écrans faciaux SAVEFACE ^{MC}	9" / 23 cm

COMPOSANTS DE REMPLACEMENT



BROSSE À MAIN
50-35900
Emballage : 1




TÊTE DE BROSS
50-55800
Emballage : 1



PÔLE D'EXTENSION
50-EXTPOLE
Emballage : 1



ÉCRAN FACIAL
SAVEFACE^{MC} SF-100
Emballage : 100 / boîte

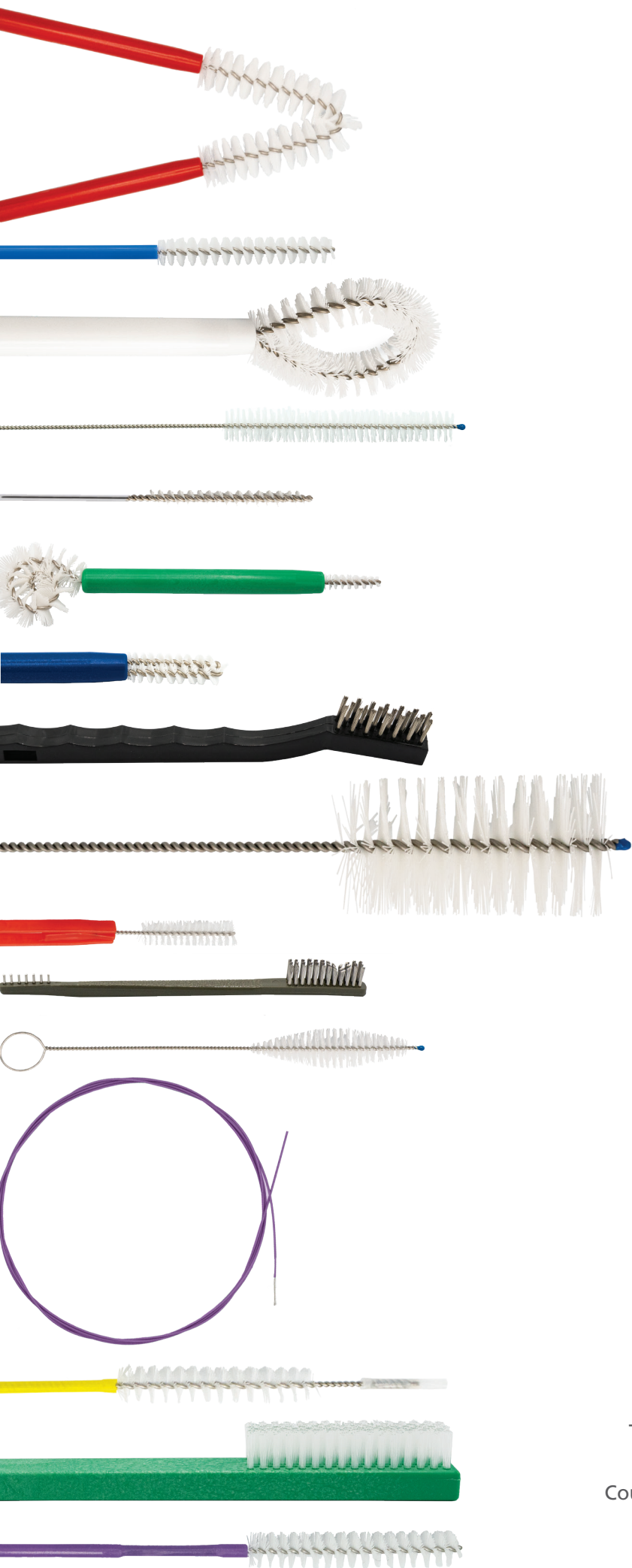

SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec H8T 2P1
Téléphone : +1 514-631-7988 | Sans frais : 800-661-5432
Télec. : +1 514-631-9083
Courriel : info@surgmed.com | Site Web : www.batrik.com