

# Cathéters ombilicaux

## Cathéters ombilicaux à lumière simple


Un cathéter ombilical à lumière simple utilisé pour un accès veineux ou artériel.

### Les cathéters veineux ombilicaux sont utilisés pour :

- Nutrition parentérale et administration de liquides
- Administration de médicaments
- Prélèvement sanguin veineux
- Transfusion de sang ou de produits sanguins
- Exsanguino-transfusion

### Les cathéters artériels ombilicaux sont utilisés pour :

- Prélèvement sanguin artériel
- Mesure de la pression artérielle
- Analyse du pH sanguin et des gaz du sang
- Administration de liquides et de médicaments

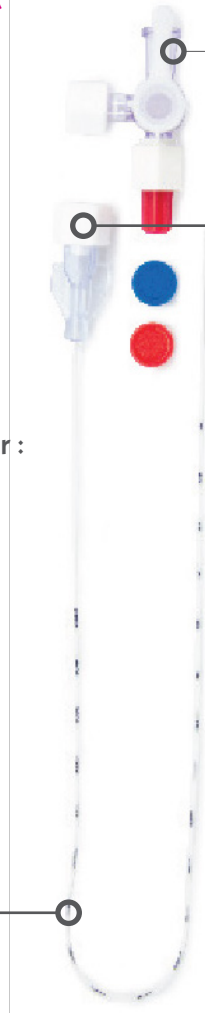

### Robinet à trois voies

- Capuchons codés par couleur pour l'identification veineuse / artérielle


### Connecteur Luer-Lock

- Pour une connexion sécurisée et efficace



### Repères numériques tous les cm

- Permettent de vérifier facilement la longueur du cathéter inséré

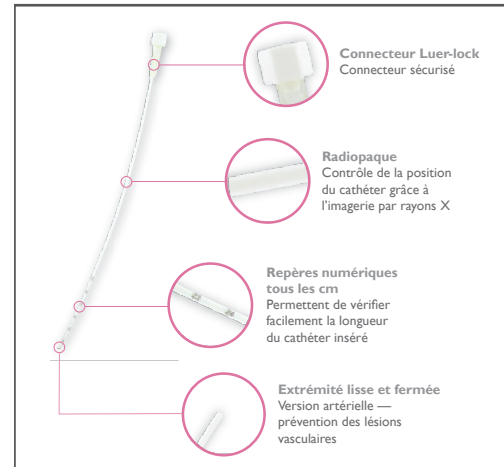

Code produit	Taille	Longueur	Volume d'amorçage	Débit	Matériau	Unités/Boîte
I270.02	2,5 Fr	30 cm	0,12 ml	>3 ml / min	PUR	8
I270.03	3,5 Fr	40 cm	0,27 ml	>10 ml / min	PUR	8
I270.04	4 Fr	40 cm	0,29 ml	>10 ml / min	PUR	20
I270.05	5 Fr	40 cm	0,40 ml	>23 ml / min	PUR	20
I270.08	8 Fr	40 cm	0,81 ml	>100 ml / min	PUR	20
270.04	4 Fr	37 cm	0,27 ml	>16 ml / min	PVC	15
270.05	5 Fr	37 cm	0,38 ml	>31 ml / min	PVC	15
270.06	6 Fr	37 cm	0,51 ml	>52 ml / min	PVC	15
270.08	8 Fr	37 cm	0,75 ml	>106 ml / min	PVC	15

## Cathéter ombilical à double lumière

Un cathéter ombilical à double lumière pour une **cathétérisation à court terme par la veine ombilicale**, lorsqu'un accès multiple est nécessaire.

- Perfusion de médicaments incompatibles
- Réduit le besoin d'accès supplémentaires
- Permet l'administration de médicaments et de nutrition en même temps



### Embases à code couleur

- Pour une identification facile et plus de sécurité



### Double lumière

- Lignes clairement marquées avec des points d'entrée séparés pour éviter le mélange de médicaments incompatibles




### Clamps néonataux

- Petit clamp pour la gestion des lignes

### Repères numériques tous les cm

- Permettent de vérifier facilement la longueur du cathéter inséré

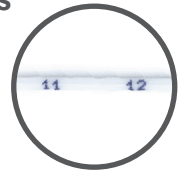

### Cathéter PUR radio-opaque pour rayons X


- Radio-opaque pour une localisation précise de l'embout sans produit de contraste supplémentaire

	Code produit	Taille	Points de sortie	Longueur	Volume d'amorçage	Débit	Unités/Boîte
PUR	1272.14	4Fr		20 cm	2 x 0,19 ml	11 & 12 ml / min	10
	1274.14	4Fr	Une latérale Une distale	40 cm	2 x 0,27 ml	6 & 7 ml / min	10
	1274.17	5Fr		40 cm	2 x 0,26 ml	7 & 9 ml / min	10

## Accessoires pour cathéters ombilicaux

Robinet à trois voies verrouillable avec bouchons d'identification (rouge et bleu) pour distinguer l'accès veineux de l'accès artériel.

- Sensation tactile de la position choisie par l'utilisateur
- La connexion Luer-lock de sécurité empêche les déconnexions accidentelles
- Résistant aux lipides

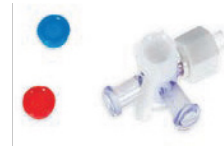

Code produit	Description	Unités/Boîte
876.20	Robinet à trois voies verrouillable avec bouchons d'identification (rouge et bleu)	50